



フワット

腰がつかなくて座れない？
腰を浮かせて座圧軽減！



ろっ骨につけるコルセットと、
イスにのせるフレームが、
座った時に体を“フワット”支えます。




ワンタッチでベルトを装着します

おなかにベルトをまわして止めるだけで、装着できます。
手間なく装着できるため、初めて使用する方も安心です。
ベルトも、気持ちの良い長さに自由自在に変更できます。

イスにそのまま座るだけ

すきなイスに、そのまま座るだけで腰をやさしく支えます。
支える強さは、フワットの高さを変えることで調整します。

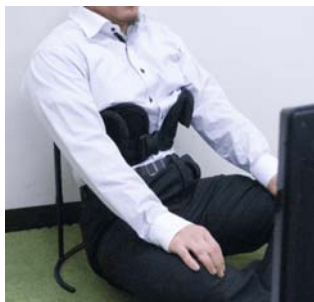


床に座る時も利用可能

たたみの上やカーペットの上など、
椅子を使わずに座る時も使えます。

座圧が軽減されます

腰やお尻にかかる圧力（右図）を
フワットのフレームが支えます。

※フワットは腰の負担を軽減するもので、
腰痛を治療するものではありません。

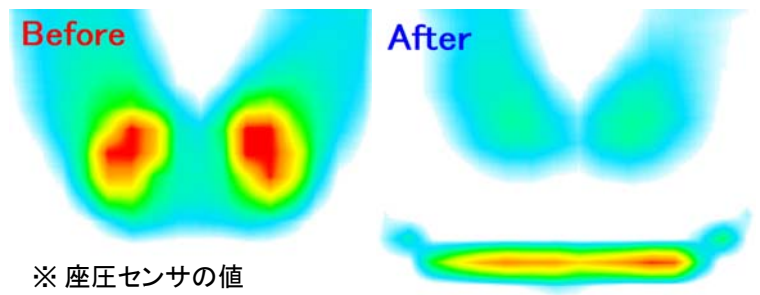

※ 座圧センサの値
(佐賀大学中山研究室調べ)

<価格>

- 定価：36,000円（税込）
 - クラウドファンディングサイト Makuake（マクアケ）にて、早割（最大33%OFF）限定販売
- ※ 販売は4/15～6/28の期間限定！

<ご購入方法>

Makuake（マクアケ）
[<https://www.makuake.com/project/fwat-fit/>](https://www.makuake.com/project/fwat-fit/)
 フワット専用サイト
[<http://fwat.fit/>](http://fwat.fit/)



お問合せ先

佐賀大学工学部 准教授 中山功一

E-mail: knakayama@is.saga-u.ac.jp



高さの調節は自由自在

2本の柱を回転させることで高さの調節ができます。
一回転させるごとに、約5mmずつ高く／低くなります。
装着パットを外して、ちょうど良い高さに調整して下さい。

様々な体形に調整可能

以下の方に推奨されます。

- ・身長130cm～195cm
- ・体重120kg以下
- ・ウエスト55cm～120cm



ジャケットの下に隠れます

コンパクトな設計なので、装着したまま、
上からジャケットなどを着ることができます。
外出しても人目を気にすることはありません。

<仕様>

- ・高さ：30cm～47cm（調整可能）
- ・横幅：43.7cm（底部の最大幅）
- ・重さ：1160g
（フレーム865g、装着パット295g）



<ご使用にあたっての注意点>

- ・座る際に指などを挟まないようお気を付けください
- ・慣れるまでは、体重の半分以上を支えないでください
- ・慣れるまでは、60分以上の連続装用は控えください

<ご使用の制限>

- 以下の方は、利用をご遠慮ください。
- ・体重120kg以上の方（破損する恐れがあります）
 - ・ウエスト120cm以上の方（ベルトが届きません）
 - ・自分で着脱できない方、意思疎通のできない方
 - ・骨粗しょう症や胸部ろっ骨に疾患のある方
（かかりつけの医師にご相談ください）

<メディア等での紹介>



福祉機器コンテスト2018で
優秀賞を受賞しました



西日本新聞で
紹介されました



テレビ東京「WBSTれたま」
で紹介されました