

使用上のご注意

フワットは医療機器ではありません
特定の疾患に対する効果を保証するものではありません
気持ちよく使える範囲でご使用ください

＜フワットの使用方法＞



お問い合わせ先
フワット公式ホームページ(<https://fwat.fit>)内のメッセージホームまで



取扱説明書

保管用

正しくお使い頂くために必ずお読み下さい。


目次

安全上のご注意[警告事項].....	2
使用上のコツ・お手入れ.....	3
使用上のご注意	4

安全上のご注意 必ずお守りください

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています
内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みにになり、記載事項をお守りください

■誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています

 警告	「死亡や重症を負う おそれがある内容」を 示しています	 注意	「けがなど障害を負う おそれがある内容」を 示しています
--	-----------------------------------	--	------------------------------------

警告

<ご使用の制限>

以下の方は、使用をご遠慮下さい

- ・体重120kg以上の方(破損する恐れがあります)
- ・ウエストが120cm以上の方
- ・ご自分で着脱できない方、意思疎通ができない方
- ・骨粗しょう症や胸部肋骨に疾患のある方
- ・胸部及び腹部の圧迫に不安のある方
- ・自動車、自転車等の運転しながらの使用はお控え下さい

その他、不安がある方はかかりつけの医師にご相談ください



必ず実行

<ご使用にあたっての注意点>

- ・座る際に指などを挟まないようにお気をつけ下さい
- ・体重の半分以上を支えることに本機器を用いないでください
- ・60分以上の連続使用はお控え下さい

その他、違和感を感じた場合には、使用を中止してください



禁止

注意



分解禁止

分解・改造は絶対にしないでください

破損や、けがをするおそれがあります

フレームの隙間で指や衣服を挟まないように注意してください

挟んで、けがや破損するおそれがあります

不安定な場所で使用しないでください

転倒して、けがをするおそれがあります

異常を感じたら、そのまま使用し続けしないでください

事故や、けがをするおそれがあります

各部分がゆるんだまま使わないでください

本体がこわれてけがをするおそれがあります

火のそばに近づけて使用しないでください

火災になることがあります



禁止

フワットを調整するコツ

ベルトを締める位置

ベルトのバックルの位置は、おへその高さが目安です
お好みで、胸(大胸筋)の下や下腹部でも装着できます

フレームの高さ

フワットを立った状態で装着した時、
フレーム下部が股よりもやや低くなる位置が目安です

お手入れ方法

<フワットの洗濯方法>

(1)取り外し

フワットのベルトとバックルを、装着パットから取り外してください
バックルをつけたままだと、洗濯機を傷つける可能性があります

(2)装着パットの洗濯

装着パットは、洗濯ネットに入れてから洗濯機に入れてください
洗濯後は、温風乾燥機能は使わずに、陰干ししてください

(3)ベルトの洗濯

ベルトは、洗剤や石鹼等で手洗いしてください
洗濯後は、乾燥機は使わずに、陰干ししてください

詳しくはフワット公式ホームページ(<https://fwat.fit>)をご覧ください

サイズ	: 437~800(幅)×162~320(奥行)×320~520(全高)・mm
重量	: 1.2Kg
許容荷重	: ~120Kg
フレーム	: φ15.9/12.7スチールパイプ・焼付塗装
パット	: ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム・ポリエステル
ベルト・バックル	: ポリプロピレン・ポリエステル・ナイロン